



—— 非医療機器 ——

バイタルモニター VM600 &測定アプリ「脳疲労・ストレススキャン」


取扱説明書

INDEX

- 目次 -

初回各種登録手順	3-5P
ログイン	6P
脳疲労・ストレス測定	7P
疲労問診	8P
測定・問診履歴の閲覧	9P
設定の変更	10P

VM600(測定機)の各部名称

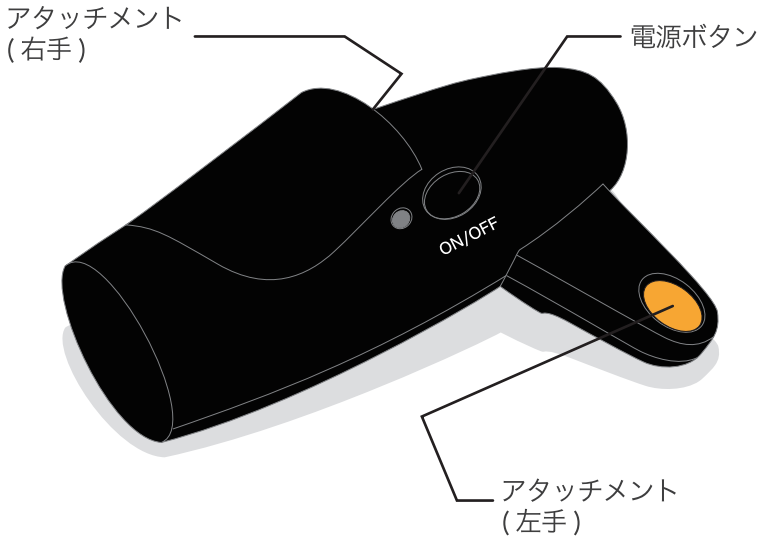

初回各種登録手順

測定アプリ「脳疲労・ストレススキャン」のインストール

ご利用のスマートフォン、またはタブレットのアプリストアから測定アプリ「脳疲労・ストレススキャン」をダウンロードし、インストール作業を行ってください。

アプリは各アプリストア内にて「脳疲労・ストレススキャン」で検索するか、または下記のQRコードより直接アプリストアにアクセスし、ダウンロードしてください。




Bluetoothの設定

はじめに測定機の電源を入れ、

次にスマートフォンまたはタブレットのBluetoothの設定画面でBluetoothを有効にしてください。

または、有効であることを確認してください。

Bluetoothの画面

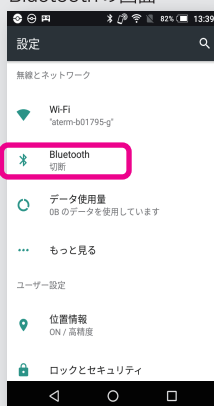


アプリの起動と測定機の登録

インストールした「脳疲労・ストレススキャン」を起動しますと、はじめに測定機の契約情報を入れる画面が表示されます。

ご購入の測定機器に同梱されている書類に記載のライセンスコードを入力してください。

送信ボタンをタップすると登録は完了いたします。

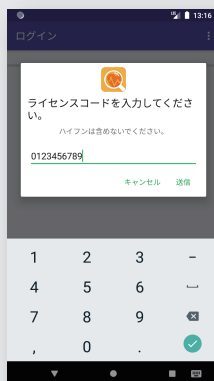

ユーザー登録(IDとパスワードの設定)

- 1 画面右上の「:」のボタンをタップし、メニューの新規登録を選択してください。
新規アカウント登録の画面が表示されます。
- 2 ユーザー情報を入力し、画面右下の保存ボタンをタップしてください。
- 3 登録したユーザーで初めてログインする場合、「情報の取得等について」の同意がもとめられます。同意するとログイン画面が表示されます。



以降6ページ参照

登録後、最初のログイン

登録ユーザーの編集と削除

- 1 編集したいユーザーのアイコンを長押しし、編集または削除ができるメニューを表示させ、編集ボタンをタップすると、アカウントとパスワードを変更することができます。変更後、保存ボタンで完了します。
- 2 パスワードを変更する時パスワードになにも入れずに保存するとログインの時パスワードの要求なしでログインできます。
- 3 削除は表示されてくる画面に応答するだけで削除されます。
- 4 ユーザーが存在しているグループアイコンは削除できません。
先にグループ内ユーザーを削除してください。



グループの作成と構成ユーザーの登録

グループを作成して、複数のユーザーをまとめることができます。


- 1 右上のメニューから新規登録を行います。その時種別をグループとします。
- 2 登録が終われば、そのグループIDを開きます。
空の画面が表示され上部に開いたIDが表示されています。(図の場合「やまだ」)
- 3 右上のメニューを使ってグループ内のユーザーを新規登録してください。



ログイン

アプリを起動しメニューを表示させるためには必ずログインが必要です。

- 1 アプリ起動時に表示されるユーザーの一覧から測定するユーザーのアイコンをタップしてください。
- 2 パスワードを入力してOKをタップしてください。
- 3 ログインが完了するとメニュー画面が表示されますので、必要なメニューのアイコンをタップしてください。

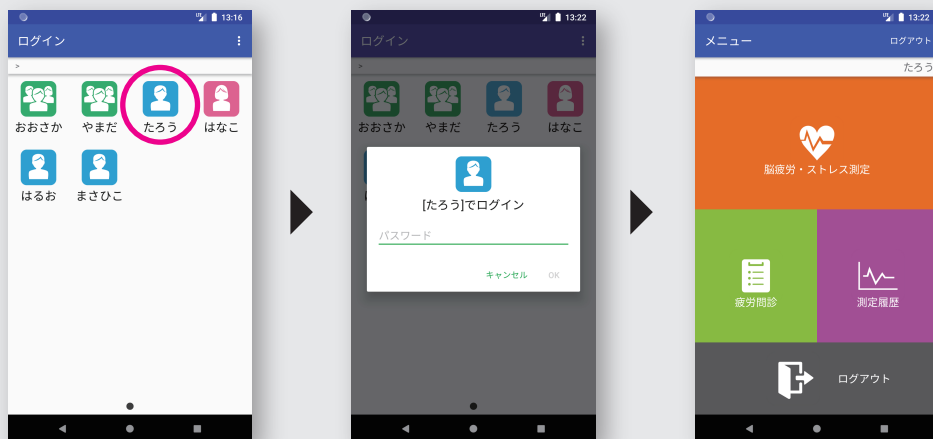

新しいユーザーを追加したい場合



ログイン画面右上の「:」ボタンをタップしてユーザー新規登録を行ってください。

▶ 以降、4ページのユーザー登録を参照してください。


脳疲労・ストレス測定手順

測定機を使って脳疲労・ストレスを計測します。

- 1 メニュー画面から脳疲労・ストレス測定のアイコンをタップしてください。
- 2 脳疲労・ストレス測定の画面が表示されたら、機器の電源をONにしてください。
- 3 ONを検知すると、測定開始ボタンがグレーから緑に変わりますのでタップしてください。
- 4 測定画面が表示されたら測定機に指をセットしてください。(下図参照)
- 5 測定が終了したら測定機から指を離してください。
- 6 測定結果画面が表示されますので、測定機の電源ボタンを押して電源を切ってください。
- 7 「閉じる」ボタンをタップするとメニュー画面に戻ります。





測定時の両手の位置イメージ

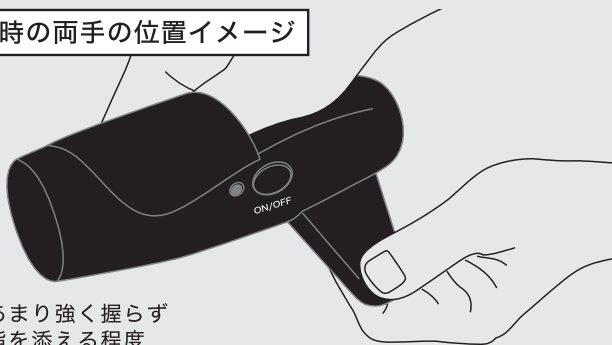

疲労問診

11の質問に答えます。


- 1 メニュー画面から疲労問診のアイコンをタップし問診画面へ進んでください。
- 2 該当度合いをスライダーを動かして適当と思われるところにセットし、「次へ」をタップして次の設問へ進んでください。
- 3 全11問に回答すると疲労問診結果が表示されます。
- 4 疲労問診結果の画面右上「閉じる」ボタンをタップするとメニュー画面に戻ります。

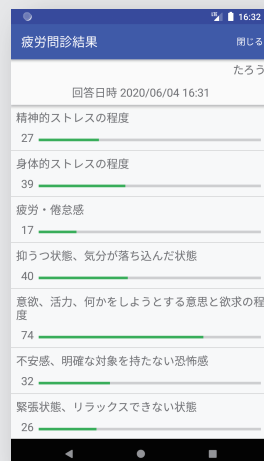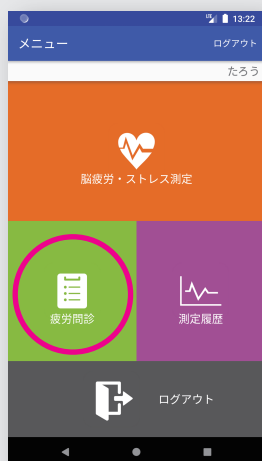

測定履歴の閲覧

脳疲労・ストレス測定と疲労問診の評価の記録を見ることができます。

- 1 メニューの測定履歴アイコンをタップすると測定履歴画面が表示されます。
- 2 問診履歴を閲覧したい場合は、画面下部の疲労問診のタブをタップすると履歴の一覧が切り替わります。
- 3 日時で閲覧したい場合は日付をタップしてください。
- 4 グラフで推移を閲覧する場合は「グラフで見る」をタップしてください。
- 5 各画面左上の「←」ボタンで前の画面に戻ることができます。

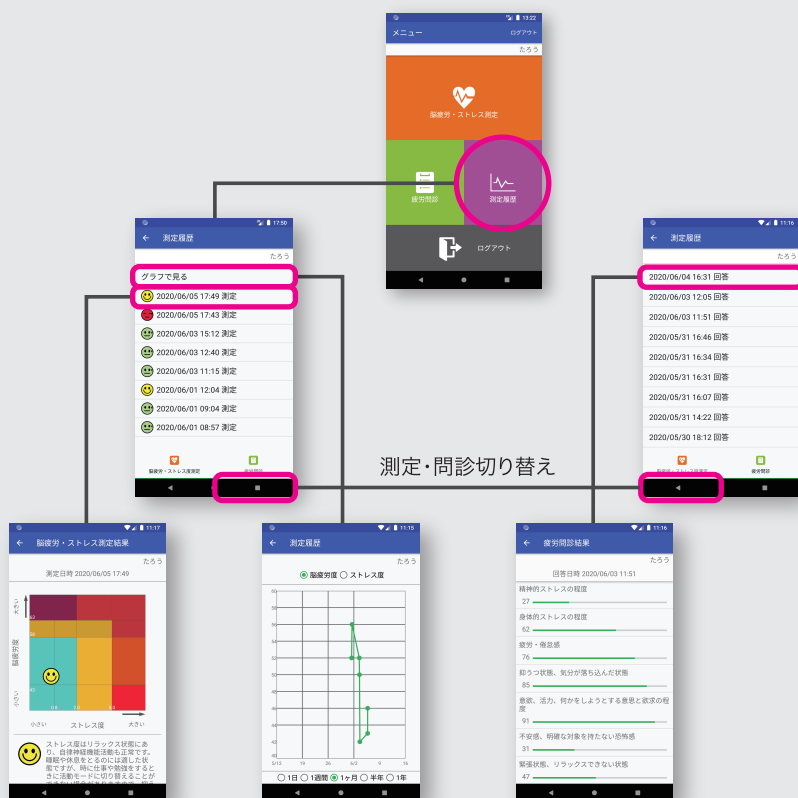


基本設定の変更

脳疲労・ストレス測定的时间と測定方法ガイドの表示を設定できます。

※この設定は全ユーザーに影響しますのでご注意ください。

- 1 ログイン画面右上の「⋮」ボタンをタップしてください。
- 2 ユーザー設定のメニューが表示されますので、「基本設定」をタップしてください。
- 3 脳疲労・ストレス測定的时间を設定することができます。

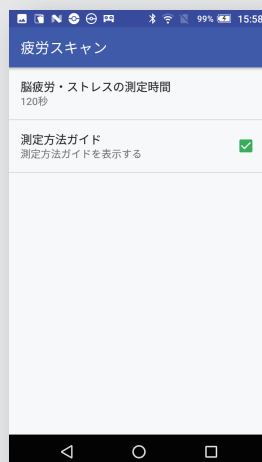

製品に関するお問い合わせ

お問い合わせはお問い合わせフォームよりお申し込み下さい。

株式会社疲労科学研究所

<http://www.fatigue.co.jp/contact/>

電話番号:06-6308-1190